

## Cytofix N

### Produktdatenblatt

#### Produktinformationen

##### Verwendung

Cytofix N ist ein Aerosol Pumpspray zur schnellen und einfachen Fixierung biologischer oder medizinischer Präparate. Die Fixierung mit Cytofix N überdeckt die Probe mit einem dünnen und transparenten Polymerfilm zum Schutz von äußeren Einflüssen bei Transport und Lagerung.

Cytofix N eignet sich zur Fixierung von Gewebe, Biopsien, Liquor, Punktate, Sputum, BAL und einer Vielzahl anderer Proben

##### Vorteile

Keine Verschleppung fremder Zellen, wie bei der Alkoholfixierung in Küvetten möglich, da jeder Abstrich / Objektträger individuell fixiert wird.

Durchgängige Fixierung des gesamten Materials.

Schutz der Probe vor mechanischer Beschädigung bei Transport und Lagerung.

Einfache Applikation.

##### Anwendung

Abstriche anfertigen und sofort (noch feucht) aus einem Abstand von etwa 15 cm mit wenigen Pumpstößen gleichmäßig mit Cytofix N besprühen. Danach ca. 10 Minuten trocknen lassen. Der Abstrich ist dann versandfertig.

Zolltarifnummer: 3822.0000  
Ursprungsland: Deutschland

GHS - Gefahrstoffkennzeichnung: Gefahrenpiktogramm GHS02

Lagerung: Trocken und bei Raumtemperatur, im fest verschlossenen Originalbehälter, getrennt von Lebensmitteln, Kindern nicht zugänglich.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher und den Fachhandel.

##### Packungsgrößen:

Bestellnummer 867 100.0100 100 ml Pumpspray  
Bestellnummer 867 100.0200 200 ml Pumpspray  
Bestellnummer 867 100.0500 500 ml Flasche  
Bestellnummer 867 100.2500 2500 ml Kanister

Stand: 12. April 2017 - Ersetzt frühere Versionen - Produktdatenblatt Cytofix N